

ProFast Sensitive ProtesFixativ

EKULFs art.nr. 2255

Formbeskrivning

Protesfixativ som förebygger/lindrar tandköttssirritationer. Upp till 12 timmars fixering.

Fördelar för kund

- Lindrande effekt för de som har inflammation/irritation i tandkötet
- Förebyggande effekt för de som vill förhindra framtida irritationer/inflammationer i tandkötet
- Håller proteserna stadigt på plats
- Överträffad vidhäftningsförmåga då fixativet inte är helt vattenlösligt
- Lätt att applicera
- Löses inte upp vid intag av mat och dryck
- Smak och luktfri
- Finns som provförpackning innehållande en 10 g tub ProFast Sensitive

Varubeskrivning

Protesfixativet ProFast Sensitive är en helt ny produkt som är speciellt utvecklad för personer med känsligt tandkött. Fixativet förebygger och lindrar tandköttssproblem som är relaterade till en dålig anpassning av proteserna. ProFast Sensitive's unika formel har en oöverträffad vidhäftningsförmåga tack vare att fixativet inte är vattenlösligt. Varken dryck eller saliv löser upp fixativet och därmed bibehåller ProFast Sensitive sin starka vidhäftningsförmåga. Kombinationen av Aloe Vera, Myrra och den unika vidhäftningsförmågan av PVA gör att fixativet lindrar irritationer och minskar inflammationer samt håller tandproteserna stadigt på plats. ProFast Sensitive har en lindrande effekt för de som har irritation/ inflammation i tandkötet och en förebyggande effekt för de som vill förhindra framtida irritationer/inflammationer.

Viktigt

- Starta med att använda en liten mängd. Öka gradvis för att se hur mycket som behövs för att uppnå optimal vidhäftningsförmåga
- Om stickningar eller sveda uppstår kan det bero på känsligt tandkött. Detta försvinner snabbt och är ofarligt. Alla ingredienser i ProFast Sensitive används inom livsmedelsindustrin
- ProFast Rengöringstabletter bör användas regelbundet. Den har en basisk lösning på pH 9, vilket ger en skonsam och effektiv rengöring av proteserna
- Förvara i rumstemperatur
- Rådgör regelbundet med din tandläkare för att säkerställa en korrekt passform av din protes
- Aloe Vera – Stärker tandkötet, lindrar tandköttssirritation
- Myrra – Förebygger, lindrar tandköttssinflammation

Ingredienser

Sodium Carboxymethylcellulose, Polyvinylacetate, Alcohol Triacetin, Paraffinium Liquidum, Silica, Aloe Vera Gel, Commiphora Myrrha Extract

Övrigt

- Medicinteknisk klass I
- CE-Märkt

Leverantör

EKULF AB, Navestadsgatan 31
Box 11101, 600 11 Norrköping
Telefon: 011-14 40 30

