

ProFast Specialtape

EKULFs art.nr. 2243

Formbeskrivning

Specialtejp för underkäksprotes.

Fördelar för kund

- Håller protesens stadigt på plats
- Ööverträffad vidhäftningsförmåga då fixativet inte är helt vattenlösligt
- Lätt att använda
- Löses inte upp vid intag av mat och dryck
- Smak och luktfri
- Finns som provförpackning

Varubeskrivning

ProFast Specialtape innehåller 4 gånger mer vidhäftande substans än ProFast Superfixativ. ProFast Specialtape används i första hand till underkäkesproteser och garanterar 12 timmars fixation mellan protes och slemhinna. Den används i de mest svåra fallen med låg crista och vid rikligt salivflöde.

Viktigt

- För att slippa detta problem så är det viktigt att specialtapan klipps till och formas ordentligt så att den passar protesens perfekt.
- Om stickningar eller sveda uppstår kan det bero på känsligt tandkött. Detta försvinner snabbt och är ofarligt.
- ProFast Rengöringstabletter bör användas regelbundet. Den har en basisk lösning på pH 9, vilket ger en skonsam och effektiv rengöring av protesens
- Förvara i rumstemperatur
- Rådgör regelbundet med din tandläkare för att säkerställa en korrekt passform av din protes

Ingredienser

Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Glycerintriacetate, Petrolatum.

Övrigt

- Medicinteknisk klass I
- CE-Märkt

Leverantör

EKULF AB, Navestadsgatan 31
Box 11101, 600 11 Norrköping
Telefon: 011-14 40 30

